




SEGURIDAD Y RENDIMIENTO

TÉCNICA DEL DOBLE ENGUANTADO

TÉCNICA DE DOBLE ENGUANTADO EL GUANTE INTERIOR IDEAL

El riesgo de exposición a patógenos transmitidos por la sangre es una de las principales preocupaciones de los cirujanos y el personal de quirófano. A menudo, indetectables por el ojo humano, las perforaciones en los guantes quirúrgicos son suficientemente grandes para permitir el paso de patógenos entre el portador del guante y el paciente y causar una infección.

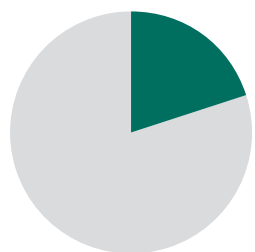

Más del **80%**
de todas las perforaciones
de los guantes quirúrgicos no
son detectadas¹⁴.

La incidencia de las microperforaciones
aumenta con el tiempo de uso¹⁵.

- » El doble guante puede reducir el riesgo de exposición a sangre y fluidos corporales hasta un 87% si el guante exterior está perforado¹⁷.
- » En un estudio, más de tres cuartos (77%) de 582 portadores de guante que utilizaban el sistema de doble guante de color, detectaron perforaciones en el guante¹⁶.

¿Qué guante ha sido perforado?*

El sistema de alerta al utilizar un guante interior de Medline. “Descubre el verde por Seguridad”.

Permita que Medline ponga en su hospital el sistema de doble enguantado “**Descubre el verde por seguridad**”. Este sistema proporciona a los cirujanos y al resto de profesionales las técnicas necesarias, no sólo para disminuir la incidencia de las perforaciones detectadas, sino para que se identifiquen rápidamente si éstas ocurren.

Sin coste para el centro, Medline proporcionará el valor de los guantes interiores de un día, por ejemplo del guante SENSICARE PI Green con Aloe Vera. El sistema “**Descubre el verde por seguridad**”, proporciona una gran oportunidad de educar al personal sanitario en cómo ellos mismos pueden disminuir la contaminación cruzada y la exposición a los patógenos transmitidos a través de la sangre.

* Ambos lo están.
(Izquierda) Guante perforado - doble enguantado con un guante interior verde oscuro. (Derecha) Guante perforado - doble enguantado utilizando dos guantes quirúrgicos estándar de color crema.

Ajusta como un único guante


A pesar de la efectividad probada del doble guante, algunos cirujanos y personal sanitario, todavía tienen dudas. Dos de los impedimentos más comunes a la hora de utilizar el doble guante son:

- 1) El guante exterior se desliza del guante interior, causando problemas potenciales de control y agarre.
- 2) Menor sensibilidad táctil y dexteridad, ya que con el segundo guante puede parecer muy voluminoso

Los guantes para realizar la técnica de doble enguantado de Medline solucionan los dos problemas, y más.

+ Adherencia con el guante exterior.

Fabricados con un revestimiento especial en la cara exterior del guante, Los guantes interiores de Medline se adhieren al guante exterior sintiéndose como si llevara un único guante, mejorando el rendimiento.

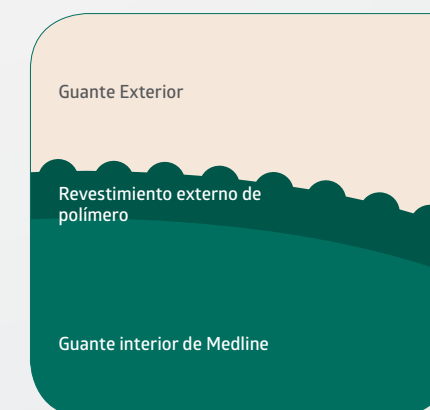

+ Fácilmente identificable.

El matiz verde oscuro de los guantes interiores de Medline permiten ver fácilmente cuando existe una perforación en el guante exterior de color claro.

+ Menos voluminoso.

Más fino que otros guantes quirúrgicos tradicionales, los guantes interiores de Medline no se sienten voluminosos o gruesos cuando se utilizan como guante interior, mejorando la sensibilidad táctil y la dexteridad.


TÉCNICA DEL DOBLE ENGUANTADO

¿Por qué se debe utilizar esta técnica?



El uso de dos guantes quirúrgicos disminuye la incidencia de accidentes corto-punzantes, lo cual reduce la infección cruzada entre el equipo quirúrgico y el paciente. Además esta técnica permite la detección precoz de la rotura de la barrera externa.

¿Cómo se realiza esta técnica?

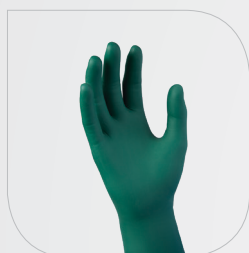

1. Guante interior de color oscuro.



2. Guante exterior de color claro para crear contraste.



¿Qué opciones propone MEDLINE?



Sensicare PI Green MSG92xx

- Poliisopreno ISOLEX
- Revestimiento externo para ajustar guante exterior
- Revestimiento interno de Aloe Vera
- Grosor 0.20mm



Dermassure Green MSG65xxl

- Policloropreno
- Sin Aceleradores químicos
- Revestimiento externo para ajustar guante exterior
- Grosor de 0.20mm



Signature Latex Green MSG55xx

- Bajo contenido en proteínas alérgicas del látex
- Revestimiento externo para ajustar guante exterior
- Revestimiento interno de Aloe Vera
- Grosor 0.20mm



Para más información, por favor, póngase en contacto con su representante de Medline, o visítenos en nuestra web www.medline.eu/es



Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España

Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com