

使いやすさとより精確性を追求したジャスティⅢのさまざまな機能。

フルオートタイプ

フルオートタイプなのですぐに測定が開始でき、従来行っていた定期的なスケールジャストや患者ごとの調整が必要ありません。

安定したメーター動作

急激なメーターブレ防止機能を搭載。安定したメーターの動きを実現しました。

二つ折りタイプ

液晶モニター部は角度調整ができるため見やすい位置を確保できます。未使用時にはコンパクトに折りたためます。



オートスイッチ


測定を開始すると電源が自動的に入り、測定終了60秒後に電源が自動的に切れるので、無駄な電池の消費を防ぎます。

コード巻き取りタイプ

コードは本体内部に巻き取りができ、邪魔になりません。また整理整頓された保管が可能です。



●本体右のボタンを押すだけで収納できます。

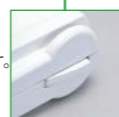


プローブコード収納

プローブコードを接続したままで折りたためます。頻繁に使用する際、いちいちプローブコードを外す必要がありません。



◎ジャスティⅢの付属部品

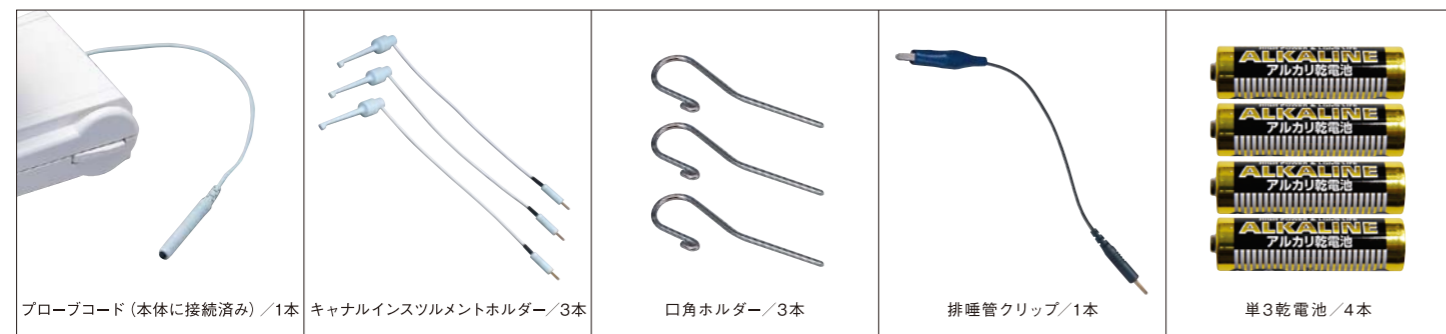

◎ジャスティⅢの仕様

- 定格電源：DC6.0V (単3乾電池×4本) ●消費電力：150mW ●測定電圧：AC50mV以下 ●測定電流：10μA以下 ●測定表示：LCD表示板 / ブザー音
- 外形寸法：○本体・W90×D130×H145mm ○折りたたみ時・W90×D130×H60mm ●質量：本体・350g (電池含まず) ●カラー：グリーン、ピンク、パールホワイト
- 標準価格：116,000円 ●一般的名称：歯科用根管長測定器 ●承認番号：21800BZX10004000 (管理 特管)

ジャスティⅢの詳細を説明したホームページができました。ぜひご覧ください。 <http://www.justy3.jp/>

●仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格は2015年12月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

◎発売元： 株式会社 **ヨネタ**
〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2931 (器材部)
◎製造販売元：株式会社吉田製作所
〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL.03-3631-2191



2015年12月/KIN/10/@40/再 (01)02747937013854

JUSTY III

歯科用根管長測定器 ジャスティⅢ

フルオート根管長測定器「JUSTY III」。
デザインと機能がシンクロする。




根尖狭窄部がより精確に把握できるEMR「ジャスティⅢ」。

JUSTY///

(X線上根尖から0.5~1.0mm)

3.0mm

ファイルの位置が進むに従って
メーター位置がリアルタイムに進みます。

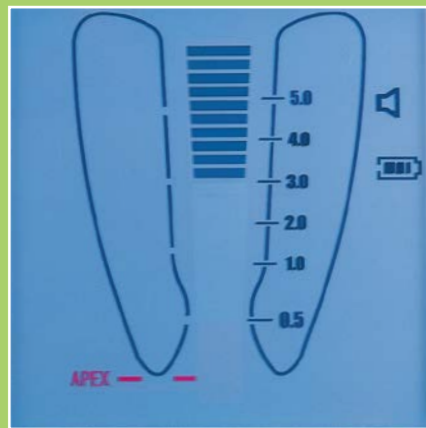

1.0mm

解剖学的根尖 (APEX) より
2.5mmアンダーから自動的に拡大画面に切り替わります。
2.0mmアンダーからメーター表示はグリーンになります。
音でも根尖が近いことをお知らせします。



0.5mm

根尖狭窄部を示します。
0.5mmジャストまで
メーターはグリーンで表示されます。



オーバー

0.5mmオーバーでメーター表示はレッドに変わります。
同時に警告音を発します。



根尖狭窄部の位置が把握できるから…

- 根尖を破壊せずにより安全なファイル位置が判別でき、
アピカルシートを形成できます。
- 根管口から根尖まで挿入したファイルとメーターの動きが連動します。
- 確認のためのレントゲン撮影を軽減できます。

歯科用根管長測定器

ジャスティⅢ



グリーン



ピンク



パール
ホワイト