




LOOOO INCREÍBLE
CON **FUTAR**[®]

REGISTRO DE MORDIDA

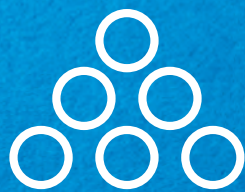

KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent

FUTAR® – ¡SIMPLEMENTE IMPRESIONANTE!

Registro de mordida

La familia de productos **Futar®** se compone de seis materiales diferentes con base de silicona A para el registro exacto de las relaciones de oclusión.

INCREÍBLE EN CALIDAD Y AVANCE

- «Made in Germany» con investigación y desarrollo propios, así como producción en Alemania

INCREÍBLE POR SU VERSATILIDAD

- ¡Seleccione entre durezas finales altas y muy altas y entre diferentes tiempos de manipulación!

INCREÍBLE DESDE HACE MÁS DE 20 AÑOS

- ¡Confíe en el líder del mercado en Alemania*!

¡No corra ningún riesgo en el registro de la mordida!



FUTAR® – RESUMEN DE LAS VENTAJAS

Futar® Cut & Trim Fast:

- Ahorro de material gracias al uso del **mezclador amarillo corto** (hasta tres registros más por cartucho)
- Dureza final extraalta (Shore-D 35)
- Ideal para procesar con la fresa o el bisturí
- ¡Escaneable para el uso de CAD/CAM en su consulta!



Futar® D / Futar® D Fast:

- Dureza final extraalta (Shore-D 43)
- Ofrece una fresabilidad excelente
- Disponible también como variante Fast: **¡para una mayor comodidad para el paciente!**



La familia Futar®
todavía es capaz de
mucho más:

Futar® / Futar® Fast:

- Alta dureza final (Shore-A 90)
- Duro en el fraguado, flexible en el procesamiento: puede recortarse muy fácilmente
- Disponible también como variante Fast: **¡para una mayor comodidad para el paciente!**



Futar® D Slow

- Dureza final extraalta (Shore-D 43)
- Tiempo de manipulación extralargo para aplicaciones que requieren más tiempo, p. ej., para el registro de la mordida miocéntrico, fijación de pilares de impresión o diseño personalizado de los bordes
- Versatilidad de uso también en el laboratorio: como material aislante o para la fabricación de segmentos de modelo












- Resultados exactos gracias a una fluidez excelente
- La elasticidad mínima reduce la compresión durante la asignación del modelo
- El exceso de material se puede romper fácilmente

**¡APLICACIÓN
SENCILLA, LIMPIA
Y RÁPIDA!**










FUTAR® – EL RENDIMIENTO VIENE DE FAMILIA

Arcada dental

|  Material para registro de mordida |  Mezcla |  Tiempo de manipulación a 23 °C ≤ |  Tiempo de permanencia en la boca 35 °C ≥ |  Tiempo de fraguado total* |  Dureza Shore (aprox.) |
|--|---|---|---|--|--|
| Futar® |  | 30 s | 90 s | 2:00 min | A 90 |
| Futar® D |  | 30 s | 90 s | 2:00 min | D 43 |
| Futar® D Slow |  | 90 s | 3:00 min | 4:30 min | D 43 |

* Tiempo de fraguado total (extracción de la boca) desde el inicio de la mezcla.

Segmento

|  Material para registro de mordida |  Mezcla |  Tiempo de manipulación a 23 °C ≤ |  Tiempo de permanencia en la boca 35 °C ≥ |  Tiempo de fraguado total* |  Dureza Shore (aprox.) |
|--|---|---|---|--|--|
| Futar® Fast |  | 15 s | 45 s | 1:00 min | A 90 |
| Futar® D Fast |  | 15 s | 45 s | 1:00 min | D 43 |
| Futar® Cut & Trim Fast |  | 15 s | 45 s | 1:00 min | D 35 |

* Tiempo de fraguado total (extracción de la boca) desde el inicio de la mezcla.

¡HAGA EL REGISTRO DE LA MORDIDA EN SOLO UN MINUTO!

FUTAR® – LA GAMA

| Futar® | Futar® Fast | Futar® D | Futar® D Fast |
|--------------------|--|----------|---------------|
| Intro pack | Cartucho de 50 ml, 6 boquillas mezcladoras verdes | | |
| Normal pack | 2 cartuchos de 50 ml, 6 boquillas mezcladoras verdes | | |
| Bonus pack | 10 cartuchos de 50 ml, 30 boquillas mezcladoras verdes | | |

| Futar® Cut & Trim Fast | |
|------------------------|--|
| Intro pack | Cartucho de 50 ml, 8 boquillas mezcladoras amarillas |
| Normal pack | 2 cartuchos de 50 ml, 8 boquillas mezcladoras amarillas |
| Bonus pack | 10 cartuchos de 50 ml, 40 boquillas mezcladoras amarillas |

| Futar® D Slow | |
|--------------------|---|
| Normal pack | 2 cartuchos de 50 ml, 6 boquillas mezcladoras verdes |



Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg · Alemania
Teléfono +49 (0)2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.com



132848_3619


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent